

Manuel d'utilisation

Analyse clinique



Module Analyse clinique

USAGE ATTENDU

Le module **“Analyse clinique”** favorise le bon usage du médicament par la détection des contre-indications et vigilances liées au terrain clinique du patient.

Ce module est à destination des professionnels de santé impliqués dans **la prise en charge médicamenteuse des patients** (médecins, pharmaciens, infirmières, sage-femme, dentiste etc.).

Il permet de connaître les contre-indications et vigilances médicamenteuses selon le terrain clinique du patient.

Les données sont issues de la base de données Thériaque.

PRÉ-REQUIS AVANT UTILISATION

Aucune formation n'est nécessaire avant l'utilisation de ce module.

Les exigences minimales nécessaires pour faire fonctionner ce module comme prévu sont décrites dans la fiche technique.

MODALITÉS D'UTILISATION

Saisie du profil du patient : terrain clinique

Renseignez dans le **“Profil Patient”** la tranche d'âge du patient, l'éventuel statut de grossesse/allaitement, les insuffisances d'organes (rénale, hépatique, cardiaque), les autres comorbidités et les allergies médicamenteuses.

N.B : le stade d'insuffisance rénale est calculé selon la formule de Cockcroft et Gault à partir du poids et de la valeur de créatininémie saisis.

Profil patient

- 65 ans

65 à 75 ans

+ 75 ans

Grossesse

Allaitement



Insuffisance rénale



Insuffisance hépatique



Insuffisance cardiaque



Allergies médicamenteuses



Module Analyse clinique

MODALITÉS D'UTILISATION

Contre-indications

Cliquez sur l'onglet "**Terrains**" pour connaître les contre-indications et vigilances liées au profil patient.

Les contre-indications et vigilances peuvent être visualisées **par médicament** ¹ ou **par terrain** ².

Pour chaque situation, le niveau d'alerte (vigilance ou contre-indication) est indiqué.

Alertes cliniques

Attention : les résultats obtenus dépendent des informations renseignées (médicaments et profil patient)

¹ Par médicament Par terrain ²

IBUPROFENE

Insuffisance rénale*

- Insuffisance rénale aigüe **VIGILANCE**

 Niveau d'alerte

Insuffisance cardiaque

- Insuffisance cardiaque non contrôlée **VIGILANCE**

Allergies médicamenteuse

- ains **CONTRE-INDICATION**

OMEPRAZOLE

Aucune problématique détectée

Outre les contre-indications, le module permet de signaler diverses alertes telles qu'un risque pour la conduite de véhicule, la présence d'un produit à caractère dopant,...

Module Analyse clinique

MISES EN GARDE

Les résultats fournis dépendent directement des **données renseignées préalablement** (liste des médicaments, profil patient). Veillez à vous assurer de l'exactitude des informations renseignées pour des résultats fiables.

INFORMATIONS EN CAS DE PROBLÈME

Toute réclamation ou dysfonctionnement en lien avec le dispositif doit nous être notifié à l'adresse contact@synapse-medicine.com

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES



Fabricant :

Synapse Medicine

17 rue Vauban 33000 Bordeaux

Dispositif médical Classe I 

Notice Analyse clinique - version du 24 janvier 2023