

Manuel d'utilisation

Effets indésirables



Module Effets Indésirables

ETIQUETTES ET SYMBOLES



Consignes de sécurité ou instructions d'utilisation importantes



Reportez-vous au manuel d'instructions



Dispositif médical conforme à la directive 93/42/CEE

USAGE ATTENDU

Le module "**Effets Indésirables**" favorise le bon usage du médicament par la recherche et l'affichage des effets indésirables d'un médicament.

Ce module est à destination des professionnels de santé impliqués dans **la prise en charge médicamenteuse des patients** (médecins, pharmaciens, infirmières, sage-femme, dentiste etc.).

Il permet à l'utilisateur de connaître la fréquence d'apparition d'un effet indésirable (très fréquent, fréquent, rare, très rare ou indéterminée). Il permet de connaître l'ensemble des effets indésirables potentiels et leurs fréquences par rapport à une ordonnance de plusieurs médicaments.

Pour cela, deux moyens de rechercher un effet indésirable :

- 1. Une barre de recherche avec un autocomplète de termes meddra**
- 2. La liste des effets recensés dans l'ordonnance saisie, classée par fréquence ou par médicament.**

Les données sont issues de la Base de données publique des médicaments de l'ANSM, et applicables aux médicaments disponibles en France mais également en Europe, par extrapolation.

PRÉ-REQUIS AVANT UTILISATION

Aucune formation n'est nécessaire avant l'utilisation de ce module.

Les exigences minimales nécessaires pour faire fonctionner ce module comme prévu sont décrites dans la fiche technique.



Module Effets Indésirables

MODALITÉS D'UTILISATION

Le module est décliné en deux fonctionnalités :

“Rechercher un effet indésirable”

“Tous les effets indésirables”

Rechercher un effet indésirable

Cette fonctionnalité vous permet de rechercher si un effet indésirable donné peut être causé par un ou plusieurs des médicaments de l'ordonnance saisie.

Saisissez l'effet indésirable recherché dans la barre de recherche d'auto-complétion (codage MedDRA), puis sélectionnez-le parmi la liste proposée.

Si l'effet indésirable est connu et rapporté pour un ou plusieurs médicaments, le degré de fréquence (très fréquent, fréquent,...) de survenue de l'effet indésirable apparaît pour chaque médicament concerné.

Pour saisir une nouvelle recherche, cliquez sur le bouton “**Revenir à la liste des effets**” situé en dessous des résultats de la recherche en cours.

Rechercher un effet indésirable

Hypotension orthos



Hypotension orthostatique

Hypotension orthostatique symptomatique

Hypotension orthostatique aggravée

Hypotension orthostatique asymptomatique

Hypotension orthostatique

Provoqué par

Fréquence

furosémide

● Très fréquent

bisoprolol (fumarate de)

● Peu fréquent

Fréquence de survenue
de l'effet indésirable ↗



Revenir à la liste des effets

Module Effets Indésirables

MODALITÉS D'UTILISATION

Tous les effet indésirables

Cette fonctionnalité vous permet de connaître l'ensemble des effets indésirables des médicaments de l'ordonnance.

Deux modes de filtre sont possibles :

- 1 Par fréquence** : les effets indésirables de tous les médicaments confondus sont affichés par degré de fréquence.
- 2 Par médicament** : les effets indésirables sont classés par médicament, et par degré de fréquence au sein de chacun.

Effets indésirables

Attention : les résultats obtenus dépendent des informations renseignées (médicaments et profil patient)

1 Par fréquence Par médicament **2**

Très fréquent

Analyses des triglycérides Déshydratation Hypotension orthostatique Hypovolémie

Fréquent

Affections gastro-intestinales Claudication intermittente Constipation Céphalées Diarrhée Douleur abdominale Encéphalopathie hépatique Fatigue
Goutte Hypercholestérolémies Hypokaliémie Hyponatrémie Hypotension Hémococoncentration Nausée Sensation de froid
Sensation vertigineuse Syndrome de Raynaud Vomissement

3 Afficher les effets moins fréquents ▼

Par défaut, seuls les effets indésirables très fréquents et fréquents sont affichés.

Cliquez sur **“Afficher les effets moins fréquents”** **3** pour dérouler le reste des effets indésirables.

Module **Effets Indésirables**

MISES EN GARDE

Les résultats fournis dépendent directement des **données renseignées préalablement** (liste des médicaments, profil patient). Veillez à vous assurer de l'exactitude des informations renseignées pour des résultats fiables.

⚠ En cas d'incertitude sur une information d'effet indésirable, veuillez consulter le RCP.

INFORMATIONS EN CAS DE PROBLÈME

Toute réclamation ou dysfonctionnement en lien avec le dispositif doit nous être notifié à l'adresse contact@synapse-medicine.com

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES



Fabricant :

Synapse Medicine

17 rue Vauban 33000 Bordeaux

Dispositif médical Classe I 

Notice Effets indésirables - Version du 24 Janvier 2023