

# Manuel d'utilisation

Interactions Médicamenteuses



# Module Interactions Médicamenteuses

## USAGE ATTENDU

Le module “**Interactions médicamenteuses**” favorise le bon usage du médicament en détectant les interactions médicamenteuses entre plusieurs médicaments de l’ordonnance.

Plusieurs sources d’informations sur les interactions médicamenteuses sont disponibles. Les interactions sont détaillées par niveau de gravité.

Ce module est à destination des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge médicamenteuse des patients (médecins, pharmaciens, infirmières, sage-femme, dentiste etc.).

Les données sont issues de différentes sources provenant de divers pays : Thesaurus de l’ANSM (France), Liverpool Interactions (UK), DDI Predictor (France) etc...

## PRÉ-REQUIS AVANT UTILISATION

**Aucune formation** n’est nécessaire avant l’utilisation de ce module.

Les exigences minimales nécessaires pour faire fonctionner ce module comme prévu sont décrites dans la fiche technique.

## MODALITÉS D’UTILISATION

Une fois les médicaments de l’ordonnance saisis, cliquez sur le bouton “**Interactions**”, puis sélectionnez la **source** d’information de votre choix dans le menu déroulant.

Les interactions s’affichent par niveau de gravité associé à la source (Exemple du Thesaurus de l’ANSM avec 4 niveaux : contre-indication, association déconseillée, précaution d’emploi, à prendre en compte). Les interactions sont également représentées sous forme graphique afin de visualiser très rapidement les couples de médicaments concernés.

Pour chaque interaction, la conduite à tenir et le mécanisme physiopathologique en cause sont indiqués.

Vous pouvez filtrer les niveaux de gravité de votre choix en les sélectionnant dans “**Afficher les gravités**”.



# Module Interactions Médicamenteuses

## MODALITÉS D'UTILISATION

Interactions ●

Terrains

Gériatrie (STOPP)

Effets indésirables

## Analyse des interactions

Attention : les résultats obtenus dépendent des informations renseignées (médicaments et profil patient)

### Choix de la gravité

Afficher les gravités :

- Contre-indication  Association déconseillée  
 Précaution d'emploi  À prendre en compte

### Choix de la source

Source sélectionnée :

Thesaurus (ANSM) ▼



### Contre-indication

Aucune problématique détectée



### Association déconseillée

2 problématiques détectées ▼

**KETOPROFENE SUN**  
100 mg, comprimé pelliculé



**IBUPROFENE BIOGARAN**  
400 mg, comprimé pelliculé

**En cause**  
anti-inflammatoires  
non stéroïdiens

**En cause**  
anti-inflammatoires  
non stéroïdiens

#### Mécanisme

Avec les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens :  
majoration du risque ulcérogène et hémorragique  
digestif.

**METHOTREXATE BIODIM L**  
25mg/1mL, solution injectable




**AMOXICILLINE BIOGARAN**  
500mg, gélule

**En cause**  
méthotrexate

**En cause**  
pénicillines

#### Mécanisme

Augmentation des effets et de la toxicité  
hématologique du méthotrexate : inhibition de la  
sécrétion tubulaire rénale du méthotrexate par les  
pénicillines.

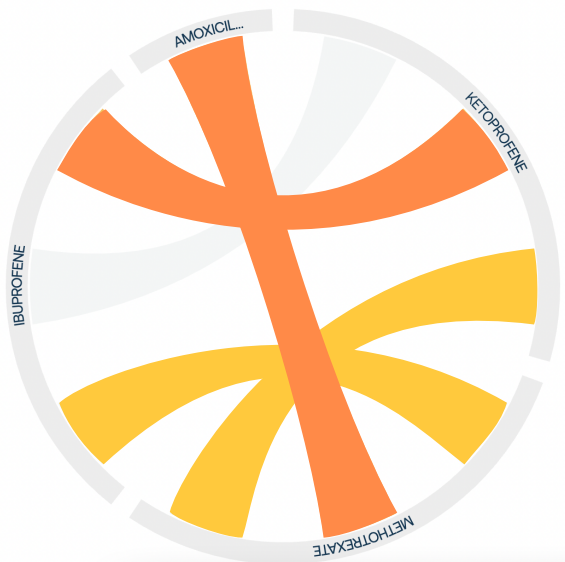

Graphiques des interactions

# Module Interactions Médicamenteuses

## MISES EN GARDE

Les résultats fournis dépendent directement des **données renseignées préalablement** (liste des médicaments, profil patient). Veillez à vous assurer de l'exactitude des informations renseignées pour des résultats fiables.

## INFORMATIONS EN CAS DE PROBLÈME

Toute réclamation ou dysfonctionnement en lien avec le dispositif doit nous être notifié à l'adresse [contact@synapse-medicine.com](mailto:contact@synapse-medicine.com)

## INFORMATIONS ADMINISTRATIVES



### Fabricant :

Synapse Medicine

17 rue Vauban 33000 Bordeaux

Dispositif médical Classe I 

*Notice Interactions médicamenteuses - version du 24 janvier 2023*